


Incisivo centrale
con tecnica rigenerativa con griglia




1 - Elemento in zona 11 splintato agli elementi adiacenti a causa della eccessiva mobilità dovuta alla perdita di supporto parodontale




2 - Situazione clinica a distanza di 3 mesi dall'estrazione dell'11: si evidenzia un grave difetto osseo orizzontale con perdita del processo alveolare

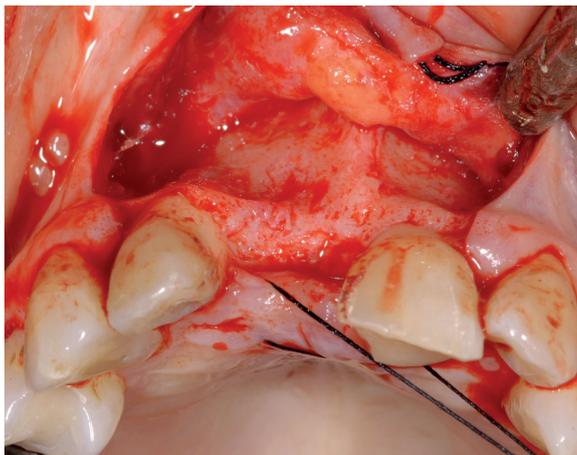


3 - Lo stesso difetto reso ancora più evidente dalla esecuzione di un lembo a spessore totale

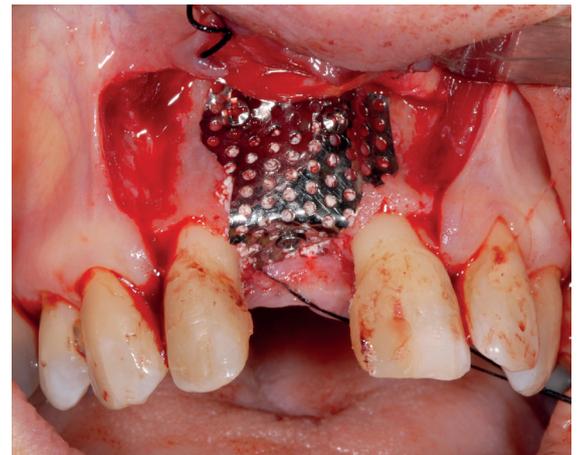

4 - Correzione del difetto mediante un innesto di osso eterologo ed una griglia in titanio

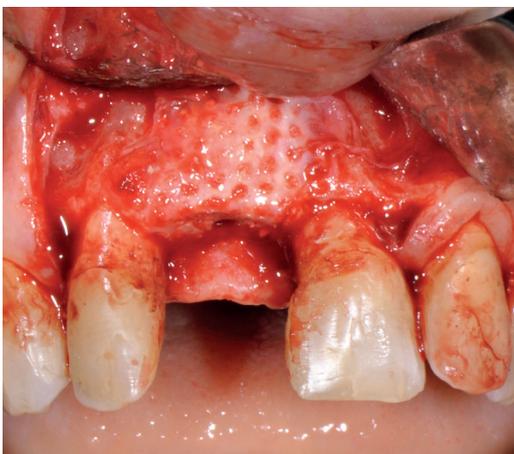

5 - Situazione clinica alla rimozione della griglia a distanza di 6 mesi dal primo intervento

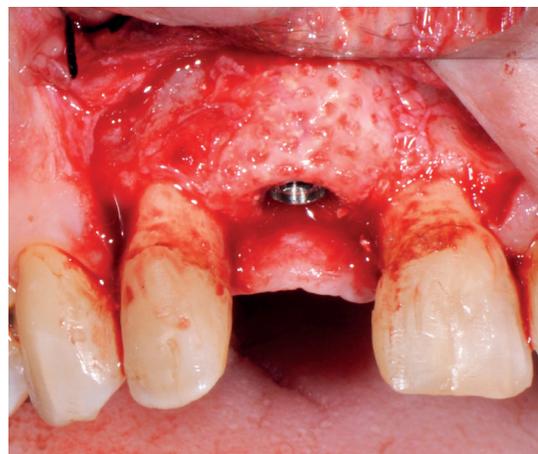

6 - Inserimento protesicamente guidato di impianto PRIME diametro 4,6 x 11,5 mm

Incisivo centrale
con tecnica rigenerativa con griglia



7 - A distanza di 6 mesi dall'inserimento implintare presa dell'impronta mediante transfert tipo pick up modificato secondo la tecnica di Hinds



8 - Impronta in polietere



9 - Corona definitiva in disilicato di litio cementata con tecnica adesiva su abutment individualizzato in zirconio