

Zirconia singola

Elementi disponibili	
Parametri spaziatore per moncone virtuale	
Gap cemento	0,01 mm
Extra gap verticale	0,02 mm
Extra gap orizzontale	0,02 mm
Spessore margine	0,2 mm
Posizione linea del colletto	1,5 mm
Rimuovere sottosquadri	<input type="checkbox"/>
Consentire la riduzione del margine	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo di riduzione del margine cervicale	Nessuno
Valore del margine cervicale	1 mm
Parametri utensili di fresatura	
Raggio cilindro	0 mm
Altezza tagliente fresa	0,5 mm
Raggio fresa di finitura	0,5 mm
Aggiunta verticale	0 mm
Applicare la compensazione utensile	<input checked="" type="checkbox"/>
Compensazione sull'intera superficie	<input type="checkbox"/>
Forzare fresatura a 3 assi	<input type="checkbox"/>
Consentire fresatura a 3,5 assi	<input type="checkbox"/>
Angolo massimo tra la telescopica e l'asse d'inserzione	20 Â°
Angolo massimo tra gli assi d'inserzione	20 Â°
Fondere le superfici	<input type="checkbox"/>
Massimo numero degli attacchi	2
Parametri spessore minimo	
Offset di emergenza	0,1 mm
Angolo di emergenza	65 Â°