

Zirconia singola

Elementi disponibili			
Parametri spessore minimo			
Offset emergenza		0,1 mm	
Angolo di emergenza		65 Å°	
Spessore minimo		0,6 mm	
Raccordo tra bordo e cappetta		0,5 mm	
Controllo angolo di emergenza con la normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
Parametri telescopica			
Inlay/Onlay Parametri			
Parametri banda dentale			
Parametri di adattamento			
Parametri Custom Abutment			
Parametri riduzione			
Riduzione occlusale		1 mm	
Riduzione cuspidе mesiale		1,5 mm	
Riduzione cuspidе vestibolare		1 mm	
Riduzione cuspidе distale		1,5 mm	
Riduzione cuspidе linguale		1 mm	
Riduzione equatore mesiale		1 mm	
Riduzione equatore vestibolare		1 mm	
Riduzione equatore distale		1 mm	
Riduzione equatore linguale		1 mm	
Riduzione cervicale		0,5 mm	
Parametri visualizzazione del materiale			
Parametri overpress			
Spazio opaco		0,08 mm	
Minimo spessore		0,5 mm	
Spessore del margine		0,03 mm	
Angolo di emergenza		65 Å°	
Riduzione globale		0 mm	
Drain-Off Gap		1,5 mm	
Parametri barra implantare			
Parametri connettori			
Anteriori		Posteriori	
Forma di default	Forma di default	Forma di default	Forma di default
Area max connettore	10 mm	Area max connettore	10 mm
Area min connettore	9 mm	Area min connettore	9 mm
Disegnate la forma			
Parametri pre nesting			
Parametri DHS			
Formato in uscita			
Katana		<input type="checkbox"/>	
STL		<input checked="" type="checkbox"/>	
STL non orientati		<input type="checkbox"/>	
STL anonimo		<input type="checkbox"/>	